

BAZZ Aqua

Sittbadkar



Installations- och Bruksanvisning

INNEHÅLL

1.0 INLEDNING.....	<u>3</u>
1.1 VAD ÄR ETT BAZZ AQUA SITTBADKAR?.....	<u>3</u>
1.2 HÄLSA OCH SÄKERHET.....	<u>3</u>
2.0 ALLMÄN BESKRIVNING.....	<u>3</u>
3.0 INGÅENDE UTRUSTNING.....	<u>4</u>
4.0 INSTALLATION.....	<u>4</u>
4.1 KRAV PÅ PLATS OCH FÖRBEREDELSE.....	<u>4</u>
<i>Yta för installation:</i>	<u>4</u>
<i>Vattenanslutning:</i>	<u>4</u>
<i>Avloppsanslutning:</i>	<u>4</u>
4.2 INTRANSPORT, UPPACKNING OCH INSPEKTION.....	<u>5</u>
4.3 UPPSTÄLLNING.....	<u>5</u>
4.4 INKOPPLING.....	<u>5</u>
5.0 IGÅNGKÖRNING.....	<u>5</u>
5.1 ÖPPNING OCH STÄNGNING AV DÖRREN.....	<u>5</u>
5.2 FYLLNING / TÖMNING.....	<u>6</u>
5.3 DEMONTERING AV FRONTPANEL.....	<u>6</u>
5.4 MONTERING AV FRONTPANEL.....	<u>6</u>
6.0 TEKNISK BESKRIVNING.....	<u>7</u>
6.1 FUNKTION.....	<u>7</u>
7.0 SKÖTSEL.....	<u>7</u>
7.1 PERIODISK TILLSYN.....	<u>7</u>
<i>Efter användning:</i>	<u>7</u>
<i>Årligen:</i>	<u>7</u>
8.0 DEMONTERING AV DÖRR OCH DELBARA STÖDBEN.....	<u>8</u>
8.1 DEMONTERING AV DÖRR:.....	<u>8</u>
8.2 DEMONTERING AV DELBARA STÖDBEN (TILLVAL).....	<u>8</u>
9.0 TEKNISK SPECIFIKATION.....	<u>9</u>
9.1 DIMENSIONER.....	<u>9</u>
9.2 INTRANSPORTVÄG, MINIMIMÅTT.....	<u>9</u>
9.3 FYLLNING / TÖMNING.....	<u>9</u>
9.4 ERFORDERLIGA EXTERNA ANSLUTNINGAR.....	<u>9</u>
<i>Avloppsanslutning:</i>	<u>9</u>
<i>Vattenanslutning (med blandarbatteri):</i>	<u>9</u>
10.0 MÅTT.....	<u>10</u>

1.0 INLEDNING

1.1 VAD ÄR ETT BAZZ AQUA SITTBADKAR?

Bazz Aqua Sittbadkar är en svensk kvalitetsprodukt som utvecklats och tillverkas av SAMECA som har mer än 40 års erfarenhet av att tillverka såväl hygienbadkar för sjukhusanvändning som olika typer av badkar för privata hem. Bazz Aqua är utvecklat för att erbjuda ett bekvämt och enkelt badande utan de krav på rörlighet och balans och därmed förknippade svårigheter och riskmoment som finns vid användning av ett konventionellt badkar. Den lättmanövrerade dörren och den låga tröskelhöjden i ett Bazz Aqua sittbadkar gör att instegsmomentet blir mycket enkelt och riskfritt. Den unika dörren, som öppnas inåt i badkaret, medför också att kraven på tillgänglig yta för installation reduceras till ett minimum.

Sittbadkaret kan också som tillval utrustas med blandare, utkastarpip och dusch. Varje badkar, med beställd utrustning monterad, testas omsorgsfullt i fabriken före leverans

1.2 HÄLSA OCH SÄKERHET

Att bada i Bazz Aqua Sittbadkar är en skön upplevelse men kan innebära påfrestningar för den badande. Studera därför följande råd och anvisningar.

- a) Var försiktig med badande i vattentemperaturer överstigande 38-39° C.
- b) Begränsa därför till en början badtiden till högst 20 minuter. Kortare tid om man är ovan.
- c) **Försök aldrig öppna dörren så länge badkaret inte är tomt. Om dörren öppnas när det finns vatten i karet kommer kvarvarande vattenmängd att flöda ut på golvet.**
- d) **Inuti badkaret finns en säkerhetskedja monterad som är fäst i avloppsproppen. Denna kan användas för tömning av badkaret om svårigheter att manövrera avloppsvredet uppstår.**

2.0 ALLMÄN BESKRIVNING

Sittbadkaret kan installeras antingen i ett hörn eller mot en rak vägg. För att kunna ta av de två frontpanelerna krävs antingen att badkaret kan flyttas fram eller att det finns fri yta vid kortsidorna så att man får tag i panelerna.

Badkaret är utrustat med en fjärrmanövrerad avloppsventil som manövreras via ett vred på badkarsväggen. En säkerhetskedja fäst direkt i avloppsproppen kan användas om svårigheter att greppa vredet uppstår.

Badkarsdörren manövreras med handtaget som är bekvämt placerat på dörrens insida. Den unika dörren öppnas inåt för att sedan föras åt sidan så att den är helt ur vägen vid in- och ursteg.

3.0 INGÅENDE UTRUSTNING

Sittbadkaret är vid leveransen komplett med all beställd utrustning. Den kompletta enheten är omsorgsfullt funktionsprovad före leverans.

Leveransen kan i enlighet med beställning inkludera:

- a) Engreppsblandare med dusch och integrerad vattenutkastare.
- b) Termostatblandare med dusch och integrerad vattenutkastare.
- c) Gröntonad dörr med screentryckt kantbård.
- d) Delbara stödben för att möjliggöra intransport genom trånga dörröppningar.

4.0 INSTALLATION

4.1 KRAV PÅ PLATS OCH FÖRBEREDELSE

Den plats där man tänker ställa karet bör vara slät och jämn och av sådan hållfasthet att den tål ytbelastningen av ett fullbelastat kar (se 9.1).

Yta för installation:

De maximala dimensionerna på karet utgör minsta möjliga installationsyta. För installation och service erfordras dock en fri yta framför sidopanelerna. Rummet klassas som våtutrymme och bör ha vattentätt golv (eventuellt med lutning till golvbrunn).

Vattenanslutning:

Vattenfyllning kan ske med väggmonterad badkarsblandare alternativt blandare som monteras på badkarskanten. Om blandare ska eftermonteras kan nödvändiga hål lätt tas i badkaret, enklast med hålsåg.

Fabriksmonterade blandare från Sameca (tillval) har utvändiga anslutningsgångar R 1/2". Anslutningarna är märkta med röda och blå prickar för varmt respektive kallt vatten. Använd flexibla slangar för anslutning av badkarsmonterad blandare. Avstängningsventiler bör installeras i ledningarna.

Avloppsanslutning:

Från avloppsventilen dras ett plaströr dia 40 mm till avlopp (golvbrunn). Tillse att anslutningsdetaljerna monteras utan att spänningar uppstår.

4.2 INTRANSPORT, UPPACKNING OCH INSPEKTION.

Placera karet på uppställningsplatsen och ta där bort emballaget. Om karet måste flyttas utan emballage bör det ske med stor försiktighet så att karets fina ytfinish inte tar skada. Om intranport måste ske genom trånga dörröppningar kan badkarsdörren öppnas och stödben monteras av (tillval) för att öka framkomligheten. Med öppen dörr och avmonterade stödben kan karet svängas in genom öppningar som är smalare än karets yttermått. Se 8.0.

Vid uppackningen bör karet inspekteras med avseende på eventuella transportskador. Kontakta leverantören om något är skadat.

4.3 UPPSTÄLLNING

Ställ karet på plats. Bestäm hur högt badkaret ska stå över golvet genom att skruva ner foten under tröskeln till önskad position. Spänn kontramuttern. **Kontrollera att karet står vågrätt med hjälp av vattenpass och om så erfordras görs justeringar med hjälp av de två skruvföterna närmast väggen.** Kontramuttern på benställningens ovansida måste lossas och justering sker sedan genom att foten skruvas upp eller ner. Under justeringen ska de två främre yttre fötterna inte nå ner till golvet.

När karet står rätt ska de två främre yttre fötterna skruvas ner så att de tar upp hela badkarets tyngd. Fotskruven under tröskeln ska då inte längre mer än nudda golvet.

OBSERVERA! Skruvfoten under tröskeln är endast ett tippskydd och ska, när injusteringen är klar, inte bära någon del av karets tyngd. Hela badkarets tyngd ska bäras av de 4 övriga fötterna.

Kontrollera att skruvföternas kontramuttrar är åtdragna så att maximal stabilitet erhålls.

Montering av paneler eller annan inklädnad ska ske först då karet är färdigmonterat och provkört.

4.4 INKOPPLING

Anslut vatten och avlopp enligt 9.4.

5.0 IGÅNGKÖRNING

5.1 ÖPPNING OCH STÄNGNING AV DÖRREN

- För dörren i en mjuk rörelse längs glidyorna i badkarsbotten från kortsidan mot dörröppningen. Avsluta rörelsen genom att trycka dörren lätt utåt så att dörren ”klickar” fast i stängt läge.
- Dörren öppnas genom att dras en aning inåt så att låsningen släpper. Därefter föres dörren i en mjuk rörelse längs glidyorna i badkarsbotten mot badkarets kortsida.

5.2 Fyllning / Tömning

- Stäng avloppet. Avloppsventilen stängs/öppnas med hjälp av ratten på badkarsväggen.
- Stäng dörren så att den ”klickar” fast i rätt position.
- Fyll karet till normal badnivå med ca 38° C vatten.

OBS! Dörren får aldrig öppnas så länge det finns vatten kvar i karet. Om dörren öppnas när det finns vatten i karet kommer kvarvarande vattenmängd att flöda ut på golvet.

- Kontrollera dörrens täthet. (Någon liten droppe kan sippra ut innan vattnet börjar trycka mot dörren.)
- Töm ut vattnet. Kontrollera tätheten i avlopp och avloppsanslutning.
- OBS! När karet inte används bör dörren normalt inte stängas helt. Tätningslisten mår nämligen bäst av att inte vara hopklämd under längre tid.

Först när allt är kontrollerat och eventuella åtgärder utförda ska frontpaneler monteras eller inklädnad ske.

5.3 DEMONTERING AV FRONTPANEL

- Dra ut badkaret några centimeter från väggen så att det går att få tag i frontpanelen.
- Ta tag i panelen och dra den ett par centimeter mot framsidan (= från väggen) så att clipsen i framkanten släpper.
- Dra därefter loss panelen rakt åt sidan så att den släpper även från kortsidans clips.
- **Om det inte är möjligt att dra fram badkaret finns det i urtaget på panelernas undersida två hål som kan användas som grepp. Speciellt när panelerna ska tas av behövs dessa om badkaret står kvar mot väggen.**

5.4 MONTERING AV FRONTPANEL

- Låt helst badkaret stå några centimeter från väggen så går det lättare att styra panelen när den ska passas in.
- Lägg märke till clipsen som sitter under badkarskanten och längs dörröppningens sidor. Det är i dessa clips som panelerna ska passas in.
- Lyft panelen och håll den i rätt höjd några centimeter utanför karets framsida. För panelen in mot karet och passa försiktigt in den en liten bit i clipset närmast väggen.
- Håll kvar panelen där och passa in den en liten bit i clipset närmast hörnet och rikta samtidigt in panelen mot clipsen på karets framkant.
- Tryck därefter panelen rakt in mot väggen så att den går i clipsen i framkanten.
- Tryck till sist in panelen den sista biten i clipset närmast väggen och justera vid behov så att den passar fint mot badkarets kanter.

6.0 TEKNISK BESKRIVNING

6.1 FUNKTION

Principen för ett Bazz Aqua Sittbadkar är mycket enkel. De rörliga delarna är få och sittbadkaret är därför mycket driftsäkert.

Dörren manövreras med handtaget på dörrens insida. När dörren stängs och ”klickar” fast i låsläget kommer tätningslisten att ligga an mot karet så att fyllningen kan påbörjas. Efterhand som vattnet fylls på kommer dörren att pressas mot tätningslisten så att tätningen blir fullständig. Den genomtänkta konstruktionen hos dörr och dörrmekanism medför att dessa delar normalt inte behöver något underhåll.

7.0 SKÖTSEL

7.1 PERIODISK TILLSYN

Vi vill rekommendera följande enkla och snabbt avklarade rutinåtgärder för att öka driftsäkerheten och bevara karets kondition.

Efter användning:

- Vi rekommenderar att den dagliga rengöringen sker med flytande tvål och mjuk trasa eller borste. Torka rutinmässigt alltid även ytan som dörrens tätningslist tätar mot. **Torka inte själva tätningslisten för att undvika att listen eller fastlimningen utsätts för onödiga påfrestningar.**
- Tätningslisten runt dörren ska alltid behandlas med stor försiktighet. Vassa föremål får ej komma i kontakt med tätningsmaterialet som då kan skadas.
- Om badkarets yta skulle börja bli matt rekommenderar vi en lätt vaxpolering så att karets ursprungliga fina ytfinish återfås. Den dagliga rengöringen går också så mycket lättare om ytan hålles blank och fin.
- Särskild försiktighet ska iakttas vid rengöring/polering av pläterade detaljer då dessa är känsliga för mekaniskt slitage och man bör inte gnugga dem mer än nödvändigt. **Detta gäller även de blanka dekorremorna på frontpanelerna.**
- Rensa bottenventilen från eventuella föroreningar. Bottenproppen kan enkelt lyftas upp för bättre åtkomlighet.

Årligen:

- Justera och åtgärda karet med avseende på skador i ytskiktet. Rengör och polishbehandla vid behov. De vanliga i marknaden förekommande medlen kan användas, dock inte sådana som innehåller slipmedel.
- För att avlägsna kalkbeläggning kan man med fördel använda något milt kalklösande medel. Eftertorkning och återvaxning rekommenderas för att den fina ytfinishen skall bevaras.
- Kontrollera att allting fungerar och att inget läckage förekommer.

8.0 DEMONTERING AV DÖRR OCH DELBARA STÖDBEN

Badkaret kan tas in genom dörröppningar som är smalare än badkarets bredd. Detta möjliggörs genom att man utnyttjar badkarets dörröppning för att ”svänga” in det runt dörrkarmen. För att kunna göra detta bör badkarsdörren tas bort. Ytterligare smalare dörröppningar kan passeras om badkaret utrustas med avtagbara stödben (tillval).

8.1 Demontering av dörr:

För att undvika att dörrens grundjustering ändras rekommenderar vi att den tas loss från badkaret genom att dela gångjärnet mellan de två blanka gångjärnshalvorna.

1. Börja med att lossa den aktuella gångjärnssprintens låsskruv (insex M5) på gångjärnets insida. Dörren måste vara i halvöppet läge för att man ska komma åt.
2. Stäng dörren så att den ”klickar” fast i låsläget..
3. Knacka försiktigt ut gångjärnssprinten med hjälp av en passande pinne. **Tänk på att hålla i dörren så att den inte faller inåt när sprinten tas bort.**
4. Hantera den lösa dörren med försiktighet, bäst är att lägga den ner på ett mjukt underlag.
5. Montering sker i omvänd ordning. **Dörren kan behöva lyftas en aning för att underlätta inpassningen av gångjärnshalvorna.**

8.2 Demontering av delbara stödben (tillval)

När badkaret ska svängas in genom minsta möjliga dörröppning måste två av stödbenen demonteras då de annars kommer att vara i vägen. Det är de två benen som sitter på badkarets ”väggsida” som ska lossas.

1. Identifiera de två ben som är förberedda för delning.
2. Lossa den gängade stången som stödjer sitsen genom att lossa muttern vid stödbenet så mycket att stången kan gängas ur sitt övre fäste.
3. Lossa skruvarna som låser fast de två utstickande stödbenen och dra ut benen.
4. Montering sker i omvänd ordning. **OBS! Muttern till den gängade stången ska inte spännas åt med mer än fingerkraft.** Stången riskerar annars att utgöra en ”domkraft” som kan deformera badkaret.

9.0 TEKNISK SPECIFIKATION

9.1 DIMENSIONER

Bredd	Sida (mot vägg)	Höjd	Vikt (netto)	Badvolym	Max vikt (vid bad)
707	1170	1000	55 kg	200 - 230 l	325 kg

Materialtoleranser: +/- 5 mm

9.2 INTRANSPORTVÄG, MINIMIMÅTT

Korridor, bredd:	ca 71 cm
Dörröppning, med öppen badkarsdörr (och svängutrymme):	ca 69 cm
Dörröppning, med delbara stödben (=tillval) (och svängutrymme):	ca 60 cm

9.3 FYLLNING / TÖMNING

Tömningshastighet	ca. 65 l/min.
Fyllningshastighet 1/2"-blandare (vid 3 bar):	ca. 24 l/min.

9.4 ERFORDERLIGA EXTERNA ANSLUTNINGAR

Avloppsanslutning:

40 mm rör, till avlopp eller golvbrunn. Kapacitet min. 2 l/sek.





Vattenanslutning (med blandarbatteri):

Vattenanslutning utförs lämpligen via flexibel slang

Varmt/kallt vatten till blandarbatteriet (tillval) (R 1/2" utvändig gänga). Normalt arbetstryck 2 – 6 bar.

Varmvattentemperatur 45-60°C, kallvattentemperatur 3-20°C. Flödeskapacitet min. 25l/min i varje ledning

10.0 MÅTT

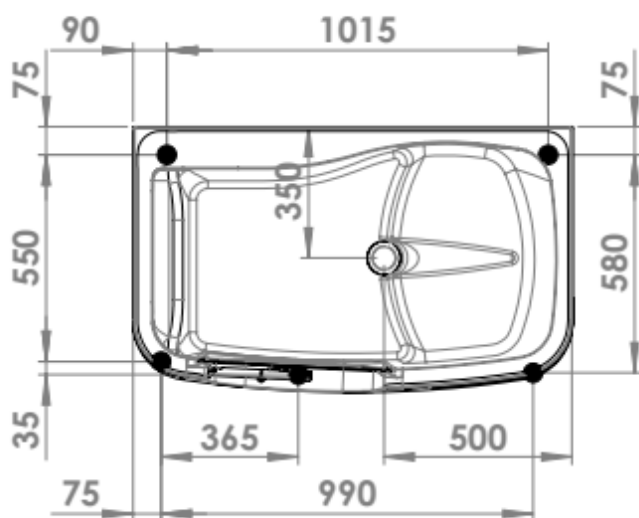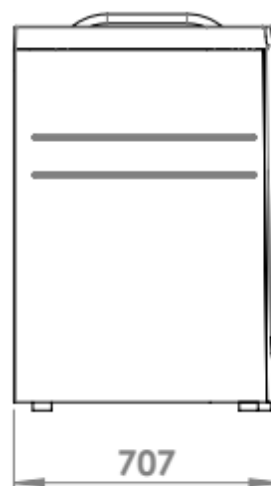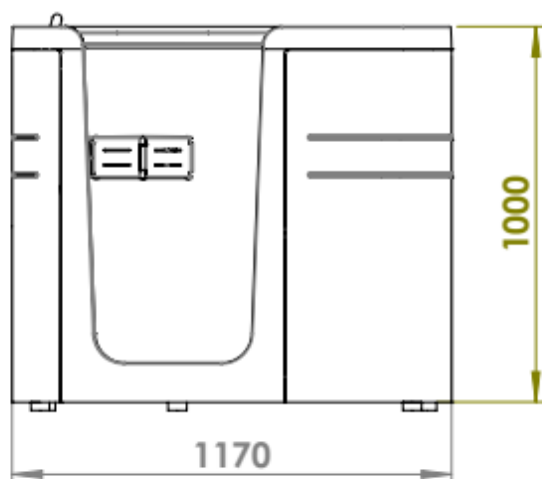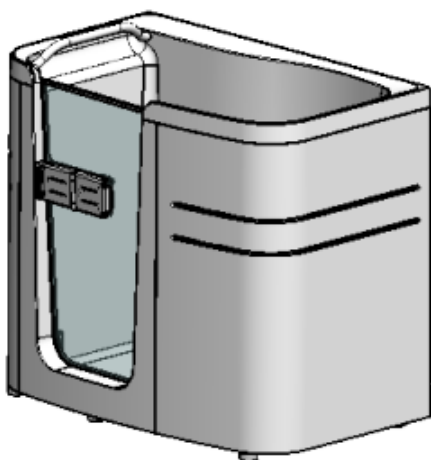

● Visar fötternas placering

World wide patent pending

SAMECA AB

SAMECA AB, S-232 39 Arlöv, SWEDEN, Tel: int + 46 40 43 23 00, Fax: int + 46 40 43 23 43, E-mail: sameca@telia.com